



273mm

의약외품

멸균제품

일회용

재사용금지

메디폼[®]H뷰티

[성상]

본 제품은 폴리우레탄필름에 하이드로콜로이드점착제가 도포된 얇은 황색의 멸균드레싱제입니다.

[효능효과]

상처부위, 환부 등의 분비물 흡수 및 보호

[용법용량]

환부에 1일1회 내지 수회 1매씩 붙인다.

[사용방법]

1) 상처 부위를 깨끗이 세정한 뒤, 완전히 건조시킵니다.
2) 제품을 꺼내어 보호필름과 분리시킨 후 날개 제품을 깨끗한 손으로 떼어내서 상처 부위에 부착합니다.
3) 상처에 부착 후, 붙을 수 있도록 부드럽게 눌러줍니다.
4) 진물을 흡수하면 제품이 하얗게 부풀어 오릅니다.
5) 제품이 진물을 잘 머금고 있도록 2~3일간 붙여주세요. 진물의 양에 따라 부착 기간은 달라질 수 있습니다.
6) 메디폼H뷰티를 제거 시 한 쪽 끝을 누르고 다른 끝을 살짝 들어올려 떼어냅니다.

[제품명]

메디폼에이치뷰티

[전성분]

폴리우레탄 필름, 하이드로콜로이드점착제

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관합니다.

[구성]

외부포장 참고

[사용기한]

외부포장 참고

®: 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.

첨부문서 작성년월 : 2023년 07월
Rev.00

제조사
(주)제네웰
경기도 화성시 향남읍 숭태상두길 281-2
www.genewel.com

판매자
한국먼디파마(유)
제품문의처 080-800-5689
www.medifoamshop.co.kr

120mm