



전

후

제인 20-4976호

의료기기

멸균제품

일 회 용

재사용금지

상처엔 처음부터 끝까지

메디폼[®]H 액티브

상처의 밀착보호와 자외선차단이 동시에 필요하다면?

메디폼[®] 이 맞는지 확인해보세요!

- 습윤 환경 조성** : 메디폼[®]H 액티브는 하이드로콜로이드 성분이 상처를 **촉촉한 습윤** 상태로 유지시키며, **병풀 추출물**과 **알로에베라**가 습윤제로서 추가 함유되어 있어 습윤 환경 조성을 돕습니다.
- 우수한 흡수력** : 메디폼[®]H 액티브의 하이드로콜로이드 성분은 우수한 흡수력으로 **상처의 진물을 흡수**하며, **CMC 성분** (소디움카복시메틸셀룰로오스)이 상처 접촉면에서 **흡착 기능**을 합니다.
- 우수한 점착력** : 메디폼[®]H 액티브의 우수한 점착력과 탄성 성분의 추가 함유로 **굴곡진 상처 부위도 밀착** 보호합니다.
- 자외선 차단지수 UPF 50+** : 메디폼[®]H 액티브는 피부 표피층에 도달하는 UVB를 90% 이상 차단하고, 진피층까지 도달하는 UVA 또한 80% 이상 차단해, **상처를 자외선으로부터 보호**합니다.
- 저자극 제품** : 메디폼[®]H 액티브는 독일 더마테스트사의 피부 자극 실험에서 **'Excellent'** 등급을 받으며 알레르기 반응 걱정을 줄인 저자극 제품입니다.
- 방수 및 오염 방지** : 메디폼[®]H 액티브의 방수력 시험 결과 물이 침투하지 않고, 외부로부터의 이물질 유입을 막아줍니다.

[형상 및 구조]

본 제품은 창상 부위를 보호하고, 체액 손실과 오염을 방지하기 위한 목적으로 사용되는 창상피복재이다. 폴리우레탄 필름에 하이드로콜로이드 점착제가 도포되어 있는 시트 형태로서 사용이 용이하며 점착면은 박리지로 보호되어 있다. 상처 접촉면의 하이드로콜로이드 성분이 상처의 삼출액을 흡수하고 창상 부위를 습윤 상태로 유지시킨다. 본 제품은 국소하이드로겔창상피복재로 감마멸균 되어 있으며 일회용으로 재사용을 금한다.

[사용목적]

삼출액의 흡수, 출혈 또는 체액손실 및 오염 방지를 위해서 사용하는 친수성 폴리머제 피복재

[사용방법]

사용 전의 준비사항

가. 제품의 포장에 파손이 없는지 확인하고, 유효기간 내 제품인지 확인한다.

나. 제품의 외관상 변형이나 이물질 부착 등을 확인한다.

다. 사용 전에 사용방법을 충분히 숙지한다.

사용방법

가. 상처 부위와 그 주변을 깨끗한 물 또는 생리식염수로 세척하여 건조한다.

나. 제품을 포장에서 꺼낸 후 상처 부위를 충분히 덮을 수 있는 사이즈를 선택하거나 적당한 크기로 자른다.

다. 박리지를 제거한 후 하이드로콜로이드 점착면을 상처 부위에 부착한다.

라. 제품이 상처부위의 삼출액을 흡수하여 하얗게 부풀어 오르면 새 것으로 교체한다.

사용 후의 보관 및 관리방법

가. 본 제품은 멸균처리된 일회용 제품이므로 재사용을 금지한다.

[사용시 주의사항]

일반적 주의

가. 고온 다습한 곳을 피해 보관하여야 한다.

나. 유효기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.

다. 포장에 파손된 제품은 사용하지 않는다.

사용상 주의

가. 사용 전 사용방법을 충분히 숙지한다.

나. 민감한 피부를 가진 환자는 사용 전 의사나 약사와 상의하여야 한다.

부작용

아래와 같은 증상이 있을 경우에는 본 제품을 사용하지 않는다

제조사

㈜제이와이팜

경기도 광주시 오포로 589-21

제조의뢰자

㈜제네웰화성지사

경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 281-2

www.genewel.com

판매자

한국먼디파마(유)

제품문의처 080-800-5689

www.medifoamshop.co.kr

제인 20-4976호

의료기기

멸균제품

일 회 용

재사용금지

상처엔 처음부터 끝까지

메디폼[®]H 액티브

상처의 밀착보호와 자외선차단이 동시에 필요하다면?

메디폼[®] 이 맞는지 확인해보세요!

- 습윤 환경 조성** : 메디폼[®]H 액티브는 하이드로콜로이드 성분이 상처를 **촉촉한 습윤** 상태로 유지시키며, **병풀 추출물**과 **알로에베라**가 습윤제로서 추가 함유되어 있어 습윤 환경 조성을 돕습니다.
- 우수한 흡수력** : 메디폼[®]H 액티브의 하이드로콜로이드 성분은 우수한 흡수력으로 **상처의 진물을 흡수**하며, **CMC 성분** (소디움카복시메틸셀룰로오스)이 상처 접촉면에서 **흡착 기능**을 합니다.
- 우수한 점착력** : 메디폼[®]H 액티브의 우수한 점착력과 탄성 성분의 추가 함유로 **굴곡진 상처 부위도 밀착** 보호합니다.
- 자외선 차단지수 UPF 50+** : 메디폼[®]H 액티브는 피부 표피층에 도달하는 UVB를 90% 이상 차단하고, 진피층까지 도달하는 UVA 또한 80% 이상 차단해, **상처를 자외선으로부터 보호**합니다.
- 저자극 제품** : 메디폼[®]H 액티브는 독일 더마테스트사의 피부 자극 실험에서 **'Excellent'** 등급을 받으며 알레르기 반응 걱정을 줄인 저자극 제품입니다.
- 방수 및 오염 방지** : 메디폼[®]H 액티브의 방수력 시험 결과 물이 침투하지 않고, 외부로부터의 이물질 유입을 막아줍니다.

가. 발열

나. 가려움

다. 알리지 반응

라. 발진

마. 피부통증

금기사항

가. 감염되거나 3도 화상 등의 깊은 상처에는 사용하지 않는다.

나. 눈과 입에는 사용하지 않는다.

다. 본 제품은 멸균 처리된 일회용 의료기기이므로 재사용을 금지한다.

[제품명]

메디폼H 액티브

[품목명]

국소하이드로겔창상피복재

[모델명]

DW100100D

[저장방법]

직사광선을 피해 실온에서 보관한다.

[사용기한]

별도표기

[포장단위]

별도표기

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 및 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

부작용 보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)

© : 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.

첨부문서 작성년월: 2024년 9월

Rev. 01

제조사

㈜제이와이팜

경기도 광주시 오포로 589-21

제조의뢰자

㈜제네웰화성지사

경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 281-2

www.genewel.com

판매자

한국먼디파마(유)

제품문의처 080-800-5689

www.medifoamshop.co.kr

120mm