

전면

제인 15-4007호

의료기기

메디폼[®]스카겔

[모양 및 구조·작용 원리]

본 제품은 실리콘을 주성분으로 하는 점착성투명창상피복재로 보습제로서 알란토인, 보존제로서 토코페롤, 양파추출물이 함유되어 있다. 실리콘이 피부 흉터에 적용되어 실리콘 막을 형성 시킴으로써 흉터보호 및 관리를 위한 환경을 제공하고 오래되거나 새로운 비대성 흉터 및 켈로이드성 흉터를 보호 및 관리하는데 도움을 주는 역할을 제공한다.

[사용목적]

오래되거나 새로 생긴 비대성 또는 켈로이드성 흉터와 아문 상처관리 및 보호

[사용 및 조작 방법]

가. 사용 전의 준비사항

1) 제품의 유효기간을 확인하고 기간 이내의 제품을 사용한다.

2) 사용설명서를 충분히 숙지하여 사용한다.

3) 상처가 아물고 피부표면 손상이 없어진 후 사용한다.

나. 조작방법

1) 사용 전 마개를 연다.

2) 흉터의 부위에 제품이 흡수될 때 까지 부드럽게 바른다.

3) 너무 많은 양을 취한 경우 과량을 티슈로 부드럽게 제거하여 옷에 얼룩이 생기지 않도록 한다.

4) 사용 후 마개를 닫는다.

5) 아침, 저녁으로 1일 2회 또는 의사의 지시에 따라 흉터부위에 적용한다.

6) 건조된 후에는 화장품 브러쉬로 화장을 할 수 있다.

다. 사용 후의 보관 및 관리 방법

1) 사용 후 마개를 반드시 닫아 보관한다.

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

3) 제품을 직사광선이나 고온다습한 곳을 피하여 위생적으로 보관한다.

[사용시 주의사항]

가. 일반적 주의사항

1) 외용으로만 사용해야 한다.

2) 열린 상처나 새롭게 난 상처에 사용해서는 안 된다.

3) 점막이나 눈에 가까운 부위에 사용해서는 안 된다.

4) 항생제나 다른 피부치료를 바른 후 사용해서는 안 된다.

5) 본 제품은 비멸균 제품이며 상처 드레싱 용도로 사용하여서는 안 된다.

6) 최근 생긴 여드름 부위에 사용해서는 안된다.

제조사

㈜퍼슨
충청남도 천안시 서북구
백석 공단1로 47

제조의뢰자

㈜제네웰화성지사
경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 281-2
www.genewel.com

판매자

한국먼디파마(유)
제품문의처 080-800-5689
www.medifoamshop.co.kr

후면

제인 15-4007호

의료기기

메디폼[®]스카겔

7) 깨끗하고 건조한 피부에만 사용해야 한다.

8) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 말아야 한다.

9) 6세 이하의 어린이는 감독 하에 사용하도록 해야한다.

10) 수유기간 동안 제품을 가슴부위에 사용 시 아이의 피부에 접촉되지 않도록 기본적인 위생 사항을 준수하는 것을 권장합니다.

11) 용도 이외의 다른 피부 치료에는 사용하지 않는다.

나. 이상반응

드물게 피부 발적, 동통 또는 자극감이 일어날 수 있음.

이런 또는 다른 이상반응이 나타날 경우, 즉시 사용을 중단하고 의사나 약사와 상담하도록 한다.

[제품명]

메디폼 스카겔

[품목명]

점착성투명창상피복재

[모델명]

MCG12N

[저장방법]

실온 (1~30℃) 보관한다.

[사용기한]

별도 표시일까지

[포장단위]

12g

※ 부작용 보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)

®: 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.

제조사

㈜퍼슨
충청남도 천안시 서북구
백석 공단1로 47

제조의뢰자

㈜제네웰화성지사
경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 281-2
www.genewel.com

판매자

한국먼디파마(유)
제품문의처 080-800-5689
www.medifoamshop.co.kr

품 명	메디폼_스카겔_설명서_221021	도수	총 1도 Blue 072 C	추가공	-	비고	-
규 격	120 mm X 210 mm						
담당자	-						
인쇄소	-						
수정사항	-						

D!N